

BLOCCS®



VEDENPITÄVÄ SUOJA

kipseille ja siteille



HOITO- JA KÄYTTÖOHJE

F Vedenpitävä Bloccs®-suoja on suunniteltu varta vasten kipsin tai sitteen suojaamiseksi, jotta käyttäjä voi kylpeä tai käydä suihkussa normaalisti. Tätä täysin vedenpitävää ja upotettavaa suojaa voi käyttää myös rannalla tai uima- tai kahlualtaassa.

VAROITUS: Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet lääkeshoidossa, pyydä lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.

Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd,
Unit J, Lawrence Drive,
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol BS37 5PG, Iso-Britannia
Puhelin: +44 (0) 1454 318197
Sähköposti: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Tämän käyttöoppaan jäljentäminen ja kopiointi, oppaasta johdetut teokset sekä oppaan jakelu ja julkinen esittäminen ovat sallittuja vain Bloccs®-yhtiön kirjallisella etukäteisluvalla.

Valmistettu Iossassa-Britanniassa.

Kaikki tuotteet on valmistettu voimassa olevan ja hyväksytyin ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardin mukaisesti.

©Bloccs® 2021



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive,
Stover Trading Estate,
Yate, Bristol,
BS37 5PG,
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030 Brussels
Belgium

BLOCCS®-SUOJAN HOITO JA KÄYTTÖ

Kiitos, että valitsit Bloccs®-tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen Bloccs®-suojan käyttöä tai sitä käyttävän lapsen valvomista. Näin varmistat, että suojaa käytetään oikein ja se pysyy vedenpitävänä.

Käytät Bloccs®-suojaa kylvyssä, suihkussa tai muussa vesiaktiiviteetissa omalla vastuullasi. Pyydä lääkäriltä neuvoa, jotta varmistut siitä, ettei tällainen aktiiviteetti vaikuta vammaan.

Bloccs®-suojan laittaminen paikalleen

Bloccs®-suoja on tehty luonnonkumilateksista, joten poista terävät korut ja varo puhkaisemasta sitä sormenkynsillä. Peitä terävät kulmat teipillä tai joustavalla siteellä.

Ennen käyttöä hiero tiivisteosaa yhteen käsilläsi ja venytä sitä hellästi. Tarkista tiiviy kokeilemalla suojaa käteen tai jalkaan, jossa ei ole kipsiä. Jos tiivisteosa tuntuu liian kireältä tai liian löysältä kokeiltaessa, valitse toisen kokoinen suoja.

Sileän ja ihonmyötäisen vedenpitävän tiivisteosan pitäisi venyä helposti kipsin yli.

Bloccs®-käsivarsisuojan/-jalkasuojan ja -kynnänpääsuojan/-polvisuojan asettaminen paikalleen on helppoa tämän vihkosen viisivaiheisten ohjeiden avulla.

Bloccs®-suojan käyttäminen

Bloccs®-suoja on tarkoitettu pitämään side tai kipsi kuivana, kun se altistuu vedelle tai upotetaan veteen. Bloccs®-suojiissa käytetään samanlaista tiivistettä kuin märkäpuvuissa.

Ennen veteen menemistä poista kaikki ilma Bloccs®-suojusta hieromalla sitä ylöspäin kohti tiivisteosaa. Tämä voidaan tehdä myös laskemalla raaja hitaasti veteen, jolloin veden paine pakottaa ilman suojan yläosaan.

Poista ilma venyttämällä tiivisteosaa hieman irti ihosta ennen veden alle upottamista, ja varmista, ettei suojan sisään pääse vettä.

Suoja täytyy laittaa paikalleen vasta juuri ennen veteen menemistä ja poistaa heti vedestä poistuttua.

Veteen meneminen on omalla vastuullasi. Älä hyppää tai sukella uima-altaaseen. Suojaa ei ole suunniteltu sukellukseen, snorklaukseen tai muuhun vesiurheiluun.

Suosittelemme tarkistamaan Bloccs®-suojan vedenpitävyyden ja mukavuuden säännöllisesti käytön aikana.

Suoja voidaan käyttää jopa 30 minuutin ajan – kunhan se pysyy mukavana eikä ole liian kireä ja se tarkistetaan säännöllisesti. Jos suojaa käytetään pidempään kuin 30 minuutin ajan, sen sisälle jäänyt ilma voi aiheuttaa hikoilua ja epämukavuutta.

LAPSIA ON VALVOTTAVA ALTAASSA TAI MERESSÄ JATKUVASTI

Suojan poistaminen

Poista Bloccs®-suoja liu'uttamalla se varovasti kädessä tai jalassa olevan siteen tai kipsin yli. Varo, etteivät sormenkynnet tai korut vaurioita tiivisteitä.

Bloccs®-suojan hoito

Bloccs®-suoja kuuluu käytössä, mutta se kestää noin neljän viikon ajan tavallisessa käytössä.

Suoja on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden ja heikkenemisen varalta.

Jos suoja on heikentynyt tai vaurioitunut millään tavalla, sen tilalle on hankittava uusi.

Suojaa on säilytettävä alle 26 °C:n lämpötilassa ja poissa lämmittimien läheisyydestä. Erittäin kylmässä suoja voi jäykistyä, mutta tämä ei ole pysyvää, ja se palautuu ennalleen lämpimässä.

Säilytystä kosteassa paikassa on vältettävä. Vältä suojan pitkäaikaista altistamista valolle, etenkin suoralle auringonvalolle, ja voimakasta UV-säteilyä tuottavalle keinovalolle.

Bloccs®-suoja voidaan pestä lämpimässä vedessä, minkä jälkeen se on kuivattava huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta.

Bloccs®-suojan asettaminen paikalleen on helpompaa, jos sen sisäpuolelle levitetään hieman talkkia. Älä kuivaa suojaa kuivausrummussa tai lämpöpatterin päällä.

Vältä kosketusta kuparin, kuparia sisältävien metalliseosten, liuottimien, öljyjen ja rasvojen kanssa, sillä ne voivat vaurioittaa Bloccs®-suoja.

Pidä poissa avotulen luota, sillä tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Jos sinulla on kysyttävää Bloccs®-suojusta, käy osoitteessa www.bloccs.com tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@bloccs.com.

Tämä käyttöopas, kokotaulukko ja tiedot Bloccs®-takuusta ovat saatavilla verkkosivustollamme www.bloccs.com ja sivulla www.bloccs.com/warranty.

Bloccs® pidättää oikeuden muuttaa käyttöopasta tarpeen mukaan. Kuluttajana vastuullasi on tarkistaa käyttöoppaan verkkoversio mahdollisten muutosten varalta.

Varoitus: Bloccs®-suoja voi olla liukas märkänä. Käytä liukuestemattoa suihkussa tai kylvyssä ja pidä toinen liukuestematto tai pyyhe saatavilla suihkusta tai kylvystä poistumista varten. Älä kävele uima-altaan reunalla Bloccs®-suojan kanssa, ja ole erityisen varovainen uima-altaan portaissa, sillä ne voivat olla liukkaat. Pidä tiukasti kiinni kaiteesta.

Varoitus: Bloccs®-suoja ei ole lelu. Vältä tukehtumisriski pitämällä tuote ja sen pakkaus poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.

Varoitus: Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet lääkehoidossa, pyydä lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. **ÄLÄ KÄYTÄ, JOS OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.**

Varoitus: Erityistä varovaisuutta on noudatettava upotettaessa jalkakipsi veteen, sillä se voi olla raskas ja rajoittaa liikkumista. Älä yritä uida jalkakipsin kanssa.

Varoitus: PICC-katetrien tai tiputusletkujen kanssa on oltava varovainen.

Varoitusta kaikista mahdollisista vaaroista tämän tuotteen käyttöön liittyen ei ole mahdollista antaa. Kuluttaja kehoitetaan siksi noudattamaan tervettä järkeä ja hyvää harkintaa Bloccs®-suojan käytössä.

Kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja ostamaan asianmukaiselle viranomaiselle.

BLOCCS®

BLOCCS®- KÄSIVARSISUOJAN TAI -JALKASUOJAN LAITTAMINEN PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä
kaikkien hoito- ja
käyttöohjeiden mukaisesti.
Katso opasvideot ja usein
kysytyt kysymykset
osoitteessa
www.bloccs.com.

1



Ota suoja pakkauksesta ja taita se auki. Poista kaikki terävät sormukset ja vastaavat esineet.

2



Ennen käyttöä hiero tiivisteosaa yhteen käsilläsi ja venytä sitä hellästi.

3



Taita suoja avoimesta päästä puoliiksi nurin päin.

4



Tarkista tiiviyys kokeilemalla suojaa ensin käteen tai jalkaan, jossa ei ole sidettä tai kipsiä.

Aseta käsivarsi tai jalka, jossa side tai kipsi on, suojan avoimesta päästä sisään niin, että käden tai jalan pää tulee suojan päätyyn asti.

5



Rullaa suoja takaisin käsivarren tai jalan päälle niin, että tiiviste on tiiviisti ihoa vasten. Jos tiiviste tuntuu liian kireältä tai liian löysältä kokeiltaessa, valitse toisen kokoinen suoja.


Päästä ilmaa ulos kellumisen estämiseksi.

BLOCCS®

BLOCCS®- KYYNÄRPÄÄSUOJAN TAI - POLVISUOJAN LAITTAMINEN PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä
kaikkien hoito- ja
käyttöohjeiden mukaisesti.
Katso opasvideot ja usein
kysytyt kysymykset
osoitteessa
www.bloccs.com.

1

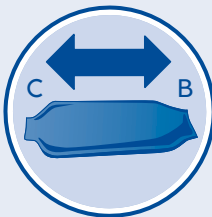

Ota suoja pakkauksesta ja
taita se auki. Poista kaikki
terävät sormukset ja
vastaavat esineet.

Suojassa on kaksi päätä:
leveämpi pää, joka tulee
tiivisti olkaparren tai reiden
ympäri (B), ja pienempi
pää, joka tulee tiiviisti ranteen
tai pohkeen ympärille (C).

2




Ennen käyttöä hiero
tiivisteosia yhteen käsillä ja
venytä niitä
hellästi.

3



Voit asettaa suojan
paikalleen helposti
kääntämällä B-pään puoliksi
nurin päin niin, että se on
juuri ja juuri C-pään
yläpuolella.


4

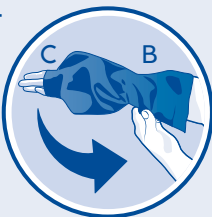

Tarkista tiiviyys kokeilemalla
suoja ensi käteen tai
jalkaan, jossa ei ole sidettä
tai kipsiä.

Työnnä joko käsi tai jalka
hitaasti sekä B- että C-pään
läpi. Rullaa sitten varovasti
B-pää ylös niin, että se on
tiivisti käsivarren tai reiden
päällä.

5

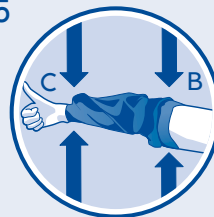

Koko sidealueen on oltava
peitettyä, ja suojan täytyy
tiivistyä vedenpitävästi
käsivarren tai jalan
ympäri molemmista
päistä. Jos tiiviste tuntuu liian
kireältä tai liian löysältä
kokeiltaessa, valitse toisen
kokoinen suoja.

Päästä ilmaa ulos kellumisen
estämiseksi.