



# PROTETOR IMPERMEÁVEL

para moldes e pensos



## GUIA DE CUIDADOS A TER E DE UTILIZAÇÃO

**PT** O protetor impermeável Bloccs® é especialmente concebido para proteger um molde de gesso, penso ou ligadura, para permitir ao utilizador tomar banho de imersão ou duche como habitualmente. Este protetor totalmente estanque e completamente submersível pode ser utilizado na praia ou na piscina.

**AVISO:** O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica.

Se estiver a receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o protetor. **NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX.**

### Bloccs®

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd,  
Unit J, Lawrence Drive, Stover  
Trading Estate, Yate, Bristol  
BS37 5PG, Reino Unido  
Telefone: +44 (0) 1454 318197  
Email: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)

[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



### Fabricado no Reino Unido

Todos os produtos são fabricados de acordo com a atual norma aprovada pelo Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001.

©Bloccs® 2021



A reprodução, cópia, obras derivadas, distribuição e exibição pública deste Manual só são permitidas com o consentimento prévio por escrito da Bloccs®.



**Precision Dippings  
Manufacturing Ltd**  
Unit J, Lawrence Drive,  
Stover Trading Estate,  
Yate, Bristol,  
BS37 5PG,  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030 Brussels  
Belgium

# CUIDADOS A TER E UTILIZAÇÃO DO PROTETOR **BLOCCS**<sup>®</sup>

Obrigado por escolher Bloccs<sup>®</sup>. Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup> ou de supervisionar uma criança que utilize um. Assim garantirá que o protetor está a ser utilizado em segurança e que o selo estanque é eficaz.

A decisão de usar o protetor Bloccs<sup>®</sup> ao tomar banho, tomar duche ou usá-lo em qualquer outra atividade envolvendo água, é tomada por sua conta e risco. Deve procurar aconselhamento médico para assegurar que a atividade não afetará o ferimento.

## Como colocar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup>

Como o seu protetor Bloccs<sup>®</sup> é feito de látex de borracha natural, deve remover qualquer joia afiada e ter cuidado para não causar furos com as suas unhas. Cobrir as bordas rugosas com fita adesiva ou uma ligadura elástica.

Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente. Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tem gesso. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, por favor escolha um protetor com um tamanho diferente.

O selo liso, impermeável e à prova de água, deve esticar facilmente sobre um penso.

**Siga os nossos guias fáceis de cinco passos incluídos neste folheto para ajudar a colocar os seus protetores Bloccs<sup>®</sup> de braço/perna e de cotovelo/joelho.**

## Utilizar o seu protetor Bloccs<sup>®</sup>

O protetor Bloccs<sup>®</sup> destina-se a manter um penso seco enquanto exposto ou imerso em água. Os protetores Bloccs<sup>®</sup> utilizam o mesmo tipo de selo que os fatos impermeáveis.

Antes de entrar na água, remova todo o ar do protetor Bloccs<sup>®</sup> massajando a cobertura em direção ao selo para libertar qualquer ar retido. Isto também pode ser feito ao baixar gradualmente o membro para dentro da água, de modo a que a pressão da água force o ar para o topo do protetor.

Puxe suavemente o selo para longe da pele para remover o ar antes de submergir, certificando-se de que nenhuma água entra no protetor.

O protetor deve ser colocado imediatamente antes de entrar na água e removido assim que sai.

A decisão de entrar na água é tomada por sua conta e risco. Não deve saltar ou mergulhar numa piscina. Os protetores não foram concebidos para mergulho, mergulho submarino ou qualquer outro desporto aquático.

Recomendamos que o protetor Bloccs<sup>®</sup> seja verificado regularmente durante a utilização para garantir que o selo permaneceu estanque e ainda é confortável.

O protetor pode ser usado até 30 minutos - desde que ainda seja confortável de usar, não sinta que esteja demasiado apertado e que seja verificado regularmente. O uso do protetor por mais de 30 minutos pode resultar em ar preso causando transpiração e desconforto.

**AS CRIANÇAS DEVEM SER SEMPRE VIGIADAS EM PISCINAS OU NO MAR.**

## Como retirar o protetor

Para remover o protetor Bloccs®, retire-o cuidadosamente de cima do penso ou gesso do seu braço ou perna. Deve ter o cuidado de assegurar que os selos não estão danificados por unhas ou joias.

## Cuidados a ter com protetor Bloccs®

O protetor Bloccs® está sujeito a desgaste, mas deve durar cerca de 4 semanas de utilização normal.

O protetor deve ser verificado antes de cada utilização para garantir que não há sinais de danos ou desgaste.

Se o protetor se deteriorou ou ficou danificado de alguma forma, deve ser adquirido um substituto. Os protetores devem ser armazenados a uma temperatura inferior a 26° C e guardados longe de radiadores. Em frio extremo, o protetor pode tornar-se rígido: isto não é permanente, e com temperaturas mais quentes volta ao estado normal.

Evite armazenar em local húmido. Evite expor o protetor durante um período prolongado à luz, em particular à luz solar direta e à luz artificial com um elevado teor de UV.

O protetor Bloccs® pode ser lavado em água quente e deve depois ser seco cuidadosamente por dentro e por fora. Ao polvilhar pó talco no seu interior, o protetor Bloccs® será mais fácil de colocar. Não seque o protetor numa máquina de secar roupa ou em cima de um radiador.

Evitar o contacto com cobre, ligas que contenham cobre, solventes, óleos e lubrificantes, pois podem danificar o protetor Bloccs®.

Mantenha afastado das chamas, pois isto pode resultar em lesões corporais graves e até morte.

*Se tiver alguma questão relativa ao seu protetor Bloccs®, por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) ou envie um email para [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)*

*Uma cópia deste manual, a nossa tabela de tamanhos e a garantia Bloccs® estão disponíveis no nosso website [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) e [www.bloccs.com/warranty](http://www.bloccs.com/warranty)*

*A Bloccs® tem o direito de modificar o manual como considerar apropriado. Como consumidor, é da sua responsabilidade verificar a versão online do manual para quaisquer modificações.*

**AVISO:** O protetor Bloccs® pode tornar-se escorregadio quando molhado. Utilize um tapete antiderrapante no chuveiro ou banheira e tenha outro tapete antiderrapante ou toalha no local para quando sair. Não deve andar à volta de uma piscina quando utiliza um protetor Bloccs® e deve ter um cuidado extra quando utiliza degraus de piscina, pois podem ser escorregadios. Agarre-se firmemente ao corrimão.

**AVISO:** Os protetores Bloccs® não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance das crianças e dos bebés.

**AVISO:** O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. Se estiver a receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o protetor. **NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX.**

**AVISO:** Deve ser tomado cuidado extra ao submergir as pernas engessadas na água, devido ao peso e ao restringimento de movimento. Não deve tentar nadar com uma perna engessada.

**AVISO:** Deve ter cuidado ao utilizar este produto caso tenha um cateter central de inserção periférica ou intravenoso.

*Não é possível avisar sobre todos os perigos possíveis relacionados com a utilização deste produto. Os consumidores são portanto aconselhados a usar o bom senso e discernimento quando utilizam um protetor Bloccs®.*


**Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em que foi adquirido.**

# BLOCCS®

## COMO COLOCAR UM PROTETOR BLOCCS® BRAÇO OU PERNA SEM ASSISTÊNCIA

O protetor deve ser utilizado de acordo com todos as instruções de cuidados e utilização.

Por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) para ver o nosso vídeo de demonstração e para ver as nossas FAQs.

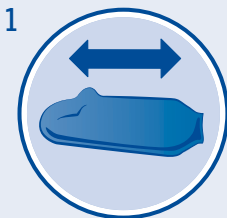

Retire o seu protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis afiados, etc.



Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente.



A partir da extremidade aberta, dobrar para trás até metade do protetor.



Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tenha gesso ou penso.

Coloque a perna ou braço necessário na extremidade aberta de modo a que o pé ou a mão fique na extremidade do protetor.



Enrole o protetor para cima do braço ou da perna até que o selo fique plano na pele. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, escolha um protetor com um tamanho diferente.


Deixe sair um pouco de ar para evitar que o protetor flutue.

# BLOCCS®

## COMO COLOCAR UM PROTETOR BLOCCS® DE COTOVELO OU JOELHO SEM ASSISTÊNCIA

O protetor deve ser utilizado de acordo com todas as instruções de cuidados e utilização. Por favor visite [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) para ver o nosso vídeo de demonstração e para ver as nossas FAQs.

1

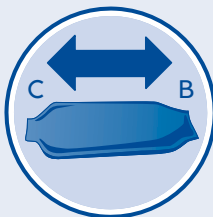

Retire o seu protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis afiados, etc. O protetor tem duas extremidades; uma extremidade mais larga para selar à volta do bíceps ou da coxa (B) e uma extremidade mais pequena para selar à volta do pulso ou na parte inferior do gêmeo (C).

2




Antes de utilizar, esfregue o selo com as mãos e estique-o suavemente.

3



Para colocar o protetor facilmente, pegue do lado da extremidade B e vire metade do protetor de dentro para fora, de modo a que fique imediatamente acima da extremidade C.


4

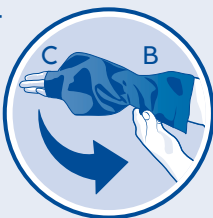

Para verificar como fica o selo, experimente a cobertura no braço ou perna que não tenha gesso ou penso. Empurre lentamente a mão ou o pé através da extremidade B e depois C.

Depois enrole cuidadosamente a extremidade B até selar suavemente no braço ou na coxa.

5

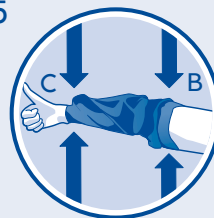

A área completa do penso deve ser coberta, e deve formar-se um selo impermeável liso à prova de água à volta do braço ou da perna em ambas as extremidades do protetor. Se sentir que o selo está demasiado apertado ou demasiado solto quando o experimentar, escolha um protetor com um tamanho diferente.

Deixe sair um pouco de ar para evitar que o protetor flutue.